



Lamedid Comércio e Serviços Ltda.
Endereço: Avenida Gupê, nº. 10767-
Galpão 20, Bloco IV - Jardim Belval.
Barueri – SP – CEP 06.422-120
Tel.: 11 4789-5878 Fax: 11 47893307

INSTRUÇÕES DE USO

EQUIPO DE INFUSÃO LAMEDID®

(2501320 – Equipo)

Fabricante: AnHui Easyway Medical Instruments Co., Ltd.

Endereço: No. 737, East Jianshe Road, Tianchang, Anhui province, P.R.China.

Telefone: 86-550-7091999

Fax: 86-550-7092288

Website: <http://www.easywaygroup.com>

Importador: LAMEDID COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Endereço: Avenida Gupê, nº. 10767 - Galpão 20, Bloco IV - Jardim Belval.

CEP: 06.422-120 – Barueri – SP

Tel.: (11) 4789-5878

Fax: (11) 4789-3307

CNPJ: 46.568.655/0001-61

Método de Esterilização: Exposição ao gás óxido de etileno.

Responsável técnico: Luciana J.Lanzillo – CRF SP 41067

Registro ANVISA n.º:10237580046

**PRODUTO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO.
PROIBIDO REPROCESSAR.**



Lamedid Comércio e Serviços Ltda.
Endereço: Avenida Gupê, nº. 10767-
Galpão 20, Bloco IV - Jardim Belval.
Barueri – SP – CEP 06.422-120
Tel.: 11 4789-5878 Fax: 11 47893307

1. DESCRIÇÃO DO PRINCÍPIO FÍSICO E FUNDAMENTOS DA TECNOLOGIA DO PRODUTO, APLICADOS PARA SEU FUNCIONAMENTO E SUA AÇÃO.

O **EQUIPO DE INFUSÃO MACRO LAMEDID®** é um sistema para administração (infusão) somente por gravidade, de soluções de uso médico-hospitalar de uso único, esterilizado por exposição ao gás óxido de etileno.

O sistema estéril é um dispositivo médico utilizado para a introdução parenteral de fluidos no corpo humano, sendo um importante coadjuvante na terapêutica de pacientes que sofrem de algum distúrbio onde há necessidade de administrar medicações endovenosas, bem como em ocasiões cirúrgicas. É um dispositivo pelo quais os fluidos parenterais são introduzidos diretamente na corrente sanguínea. Apresenta-se na forma flexível. Pode ser utilizado de forma intermitente para processos de infusão, desde que os fluidos sejam introduzidos parenteralmente por veninputura no organismo.

Imagem para visualização do produto:



Fotografia 01 – Equipo de Infusão LAMEDID®



Lamedid Comércio e Serviços Ltda.
Endereço: Avenida Gupê, nº. 10767-
Galpão 20, Bloco IV - Jardim Belval.
Barueri – SP – CEP 06.422-120
Tel.: 11 4789-5878 Fax: 11 47893307

Informações gráficas, para visualização do produto:



Fotografia 02 – Equipo de Infusão LAMEDID® em sua embalagem unitária.

2. INDICAÇÃO, FINALIDADE OU USO A QUE SE DESTINA O PRODUTO MÉDICO, SEGUNDO INDICADO PELO FABRICANTE.


O **EQUIPO DE INFUSÃO LAMEDID** é indicado para:

- Infusão de soluções no corpo humano;
- Administração parenteral de fluidos.

3. COMPONENTES OU ACESSÓRIOS DESTINADOS A INTEGRAR O PRODUTO, ASSIM COMO OS OPCIONAIS E MATERIAIS DE CONSUMO POR ELE UTILIZADOS; RELAÇÃO DOS MATERIAIS DE APOIO QUE ACOMPANHAM O PRODUTO.

O **EQUIPO DE INFUSÃO LAMEDID** é formado por vários dispositivos conforme ilustrado nas figuras a seguir:

Figura 1

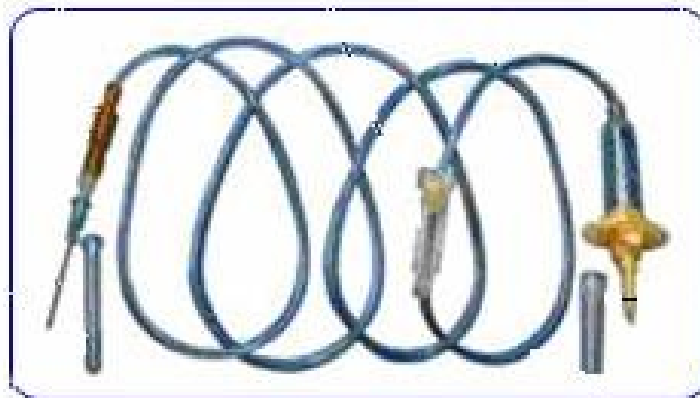

A figura 1 mostra o produto acoplado a uma agulha, a Lamedid Comercial e Serviços LTDA., esclarece que a figura é meramente ilustrativa e a agulha **não acompanha o produto.**

A figura 2 mostra maiores detalhes do produto do conjunto de infusão e ilustra seus componentes

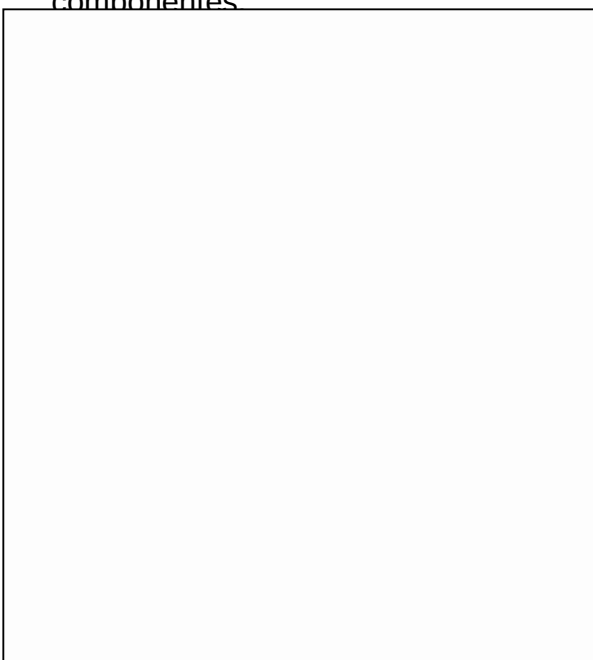


Figura 2:

1. Cápsula protetora do dispositivo de perfuração +* fechamento.
2. Dispositivo de perfuração - fechamento.
3. Entrada de ar com filtro de ar e fechamento.
4. Canal de fluido.

5. Tubo de gotejamento.
6. Câmara de gotejamento.
7. Filtro de Fluido.
8. Tubos.
9. Regulador de Fluxo.
10. Sítio de injeção.
11. Encaixe macho.

O **Equipo de Infusão Lamedid** é dividido em Equipo de infusão com micro gotejamento e Equipo de infusão com macro gotejamento.

As **partes** destinadas a integrar o produto são mostradas abaixo:

- 9 Filtro do fluido dentro da câmara de gotejamento ou do sítio de injeção (opcional);
- 9 Bulbo de látex, no modelo simples;
- 9 Bico Luer slip ;
- 9 Conector Y (modelo com injetor lateral);
- 9 Entrada de ar com filtro e fechamento(modelo equipo com entrada de ar).



Filtro de Fluido



Bico Luer tip



Tubos de PVC



Bulbo de látex



Conector "Y"

Não há **acessórios**, **materiais consumíveis** pelo produto e nem **materiais de apoio** destinados a integrar o produto. Todas as informações necessárias para o seu uso encontram-se impressas na embalagem.

Relação dos materiais de apoio que acompanham o produto ou opcionais

O produto vem acompanhado de Instruções de Uso, destinado a integrar o produto.



Lamedid Comércio e Serviços Ltda.
Endereço: Avenida Gupê, nº. 10767-
Galpão 20, Bloco IV - Jardim Belval.
Barueri - SP - CEP 06.422-120
Tel.: 11 4789-5878 Fax: 11 47893307

4. ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO.

O Equipamento de Infusão Lamedid apresenta-se em embalagens individuais, em caixas contendo 20 embalagens individuais e em caixas de papelão com 500 embalagens individuais.

O **EQUIPO DE INFUSÃO LAMEDID** possui as seguintes especificações técnicas:

- Câmara de gotejamento:
 - 9 **Material:** PVC;
 - 9 **Transparência:** transparente;
 - 9 **Comprimento total (mm):** 50;
 - 9 **Diâmetro Externo do tubo de micro gotejamento (mm):** 14,3

- Dispositivo ABS com Roldana para Regulação do fluxo - micro gotejamento ou macro gotejamento:
 - **MODELO COM ENTRADA DE AR**

- Filtro de ar:

Material: HDPE filtro de tipo de disco branco;
Posição: câmara de gotejamento;
Dimensão:- Tamanho do poro (mícrons): 15 ou 30 ± 5

 - **MODELO COM FILTRO**

- Filtro de fluido:

Material: HDPE, tipo disco branco; **Posição:** na câmara de gotejamento; **Dimensão:-** Tamanho do poro (mícrons): 15 /30



Lamedid Comércio e Serviços Ltda.
Endereço: Avenida Gupê, nº. 10767-
Galpão 20, Bloco IV - Jardim Belval.
Barueri – SP – CEP 06.422-120
Tel.: 11 4789-5878 Fax: 11 47893307

- [Tubos de PVC:](#)

Material: PVC;

Flexibilidade: flexível.

Clareza: transparente/ translúcido fosco.

Comprimento (mm): medidas variadas

- [Injetor Y:](#)

Material: isento de látex;

- [Cápsula Protetora do dispositivo](#)

[perfurante:](#) **Material:** LDPE, Branco,
translúcido. **Comprimento (mm):** 42

Diâmetro Interno da Extremidade Aberta (mm): 7

- [Bico Luer slip:](#)

Material: LDPE, Branco, translúcido.

Impede que a agulha se desprenda acidentalmente do equipo, padrão 6%luer.

O material de embalagem do **EQUIPO DE INFUSÃO LAMEDID®** é constituído por:

Papel Grau Cirúrgico ou Folhas de PVC com padrões de qualidade;

Impressão do interior e do exterior das caixas com padrão de qualidade.

DETALHES DA EMBALAGEM:

Caixas com 20 embalagens contendo 25 equipos embalados individualmente

Caixas de Papelão com 500 embalagens individuais.



Lamedid Comércio e Serviços Ltda.
Endereço: Avenida Gupê, nº. 10767-
Galpão 20, Bloco IV - Jardim Belval.
Barueri – SP – CEP 06.422-120
Tel.: 11 4789-5878 Fax: 11 47893307

5. INSTRUÇÕES DE USO - INFORMAÇÕES E INSTRUÇÕES PARA USO DO PRODUTO, INCLUINDO AQUELAS A SEREM SEGUIDAS PELOS PROFISSIONAIS:

Não-pirogênico, atóxico. Esterilidade garantida se a embalagem não estiver danificada. Estéril / EO.

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Verifique a integridade da embalagem antes da sua utilização e a data de validade do produto;
2. **VERIFIQUE A INTEGRIDADE DO PRODUTO ANTES DE SUA UTILIZAÇÃO. Não o utilize caso haja alguma alteração;**
3. Feche a presilha de controle;
4. Remova o protetor da ponta plástica perfurante e insira no indicado para haja escoamento da solução (frasco sistema fechado);
5. Suspenda o frasco (gravitacionalmente), não preencha completamente a câmara com a solução;
6. Remova o protetor da extremidade ;
7. Abra o controlador de fluxo e permita que a solução desloque inteiramente o ar ao longo do tubo e da agulha. Feche a presilha;
8. Realize uma veninputura;
9. Remova o protetor da extremidade e conecte firmemente no dispositivo da veninputura;
10. Regule o fluxo pela abertura da presilha:
 - ✓ Não utilizar para sangue ou seus derivados;
 - ✓ Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada;
 - ✓ Descartar o produto após utilização única no lixo hospitalar conforme as normas vigentes das autoridades sanitárias;
11. Destinado a liberar aproximadamente 20 gotas/ml (Adulto);



Lamedid Comércio e Serviços Ltda.
Endereço: Avenida Gupê, nº. 10767-
Galpão 20, Bloco IV - Jardim Belval.
Barueri – SP – CEP 06.422-120
Tel.: 11 4789-5878 Fax: 11 47893307

6. PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O PRODUTO, BEM COMO SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE.

- Ler as instruções de uso do produto;
- Seguir detalhadamente todas as orientações de uso;
- Este produto deve ser usado apenas por um médico qualificado ou um paramédico;
- Não permitir que pessoas despreparadas utilizem o produto em questão;
- Não permitir o uso indevido bem como o mau uso do produto;
- Ao manipular o equipo, utilize as técnicas e instrumentais adequados. Utilizar sempre técnicas assépticas no manuseio.
- O produto é estéril, não pirogênico e atóxico se a embalagem não for aberta ou danificada;
- É um produto de uso único, devendo ser descartado após o uso. Produto não reciclável, limpável ou re-esterilizável;
- O produto deve ser armazenado em local seco e fresco. Protegido do calor excessivo e da luz do sol direta;
- Os equipos, de uso único, são acondicionados em embalagens não reutilizáveis, de forma que estão estéreis no momento de sua comercialização e que mantêm esta qualidade nas condições previstas de armazenamento e transporte, até que a embalagem protetora que garante a esterilidade seja violada ou aberta;
- Apesar de o produto passar por rigoroso controle de qualidade antes de ser liberado pelo fabricante para comercialização, uma checagem visual do estado da embalagem e da superfície do produto é aconselhável, pois este pode ter sido vítima de acidentes de transporte e/ou de manuseio incorreto que o danifiquem e restrinjam seu uso.



Lamedid Comércio e Serviços Ltda.
Endereço: Avenida Gupê, nº. 10767-
Galpão 20, Bloco IV - Jardim Belval.
Barueri – SP – CEP 06.422-120
Tel.: 11 4789-5878 Fax: 11 47893307

- Observe se há alterações nas características superficiais do produto ou da embalagem. Use somente dispositivos que estiverem em embalagens lacradas e que não estejam danificados, ou seja, que estiverem com o estado superficial íntegro;
- Descarte e não use equipos fora do prazo de validade e/ou previamente abertos ou danificados, nem aqueles com perda da esterilidade. Recomenda-se, então, que o equipo retorne ao fornecedor para processamento, ou seja, descartado no lixo hospitalar (conforme as normas da autoridade sanitária local). A esterilidade do artigo só é garantida se houver estado íntegro da embalagem e do artigo e este estiver dentro do prazo de validade;
- Não re-esterilize nem reutilize o equipo;
- A esterilidade do artigo só é garantida se houver estado íntegro da embalagem e do artigo e este estiver dentro do prazo de validade;
- Os produtos que forem removidos da embalagem e inseridos dentro do ambiente cirúrgico, mesmo que não tenham sido utilizados ou contaminados por outras fontes, não devem sofrer limpeza subsequente e convém que a sejam descartados no lixo hospitalar, conforme as normas da autoridade sanitária local;
- Em hipótese alguma utilize o produto caso o mesmo tiver sido contaminado;
- Ao manipular os equipos, utilize as técnicas adequadas;
- Todos os dispositivos médicos têm um risco inerente. Entretanto, estes riscos podem ser minimizados utilizando-se materiais de alta estabilidade que sejam não-tóxicos e biocompatíveis;
- As orientações fornecidas aqui devem ser executadas depois da entrega ao comprador e objetivam assegurar que os artigos permaneçam livres de contaminação ou dano antes de sua utilização no paciente. As orientações são dirigidas a todas as pessoas envolvidas no recebimento e manuseio dos artigos. É importante que todo o pessoal esteja familiarizado com os procedimentos recomendados, a fim de minimizar o risco e a ocorrência de danos ao artigo.



Lamedid Comércio e Serviços Ltda.
Endereço: Avenida Gupê, nº. 10767-
Galpão 20, Bloco IV - Jardim Belval.
Barueri – SP – CEP 06.422-120
Tel.: 11 4789-5878 Fax: 11 47893307

ARMAZENAMENTO:

Todos os componentes e produtos montados são armazenados em um contêiner plástico fechado, limpo, livre de fibras e outras matérias particuladas.

O equipo deve ser armazenado em local fresco, ventilado, seco e sem gases corrosivos. Umidade relativa não deve ser maior que 80%. Convém que não sejam expostas diretamente à luz do sol, radiação ionizante, extremos de temperatura ou contaminação particulada.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:

O produto deve ser armazenado em local seco e fresco. Protegido do calor excessivo e da luz do sol direta.

ESTOCAGEM:

Em todas as áreas de estocagem, antes da utilização, o artigo deve ser armazenado de forma a manter sua configuração e seu acabamento de superfície e não danificar sua embalagem. Armazenar em estantes de armação metálica ou vidro, com altura mínima do piso, possibilitando assim a limpeza e higiene diária; garantir que o ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto estocado.

ROTAÇÃO DE ESTOQUE:

O princípio “primeiro que entra, primeiro que sai” é recomendado. Convém que seja adotada a prática de rotação de estoque para todos os artigos estéreis e não estéreis, em todas as áreas de estocagem.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:

- ✓ Ler as instruções antes do uso;
- ✓ Este produto deve ser usado apenas por pessoal habilitado e capacitado;
- ✓ Checar previamente a integridade da embalagem e do produto antes de usar bem como a data de validade;



Lamedid Comércio e Serviços Ltda.
Endereço: Avenida Gupê, nº. 10767-
Galpão 20, Bloco IV - Jardim Belval.
Barueri - SP - CEP 06.422-120
Tel.: 11 4789-5878 Fax: 11 47893307

- ✓ O produto é estéril, não pirogênico e atóxico se a embalagem não for aberta ou danificada;
- ✓ É um produto de uso único, sendo desprezado após o uso. Produto não reciclável, limpável ou reesterilizável;
- ✓ Usar o produto imediatamente após a abertura da embalagem;
- ✓ O produto deve ser armazenado em local seco e fresco. Protegido do calor excessivo e da luz do sol direta;
- ✓ O produto deve ser usado de acordo com as instruções de uso;
- ✓ Os equipos, de uso único, são embalados em embalagens não reutilizáveis, de forma que estão estéreis no momento de sua comercialização e que mantêm esta qualidade nas condições previstas de armazenamento e transporte, até que a embalagem protetora que garante a esterilidade seja violada ou aberta;
- ✓ Apesar do produto passar por rigoroso controle de qualidade antes de ser liberado pelo fabricante para comercialização, uma checagem visual do estado da embalagem e da superfície do produto é aconselhável, pois este pode ter sido vítima de acidentes de transporte e/ou de manuseio incorreto que o danifiquem e restrinjam seu uso. Observe se há alterações nas características superficiais do produto ou da embalagem. Use somente dispositivos que estiverem em embalagens lacradas e que não estejam danificados, ou seja, que estiverem com o estado superficial íntegro;
- ✓ Qualquer equipo que tenha caído ou sido mal manuseado e que seja suspeito de ter sofrido dano não pode ser usado e deve ser descartado, sendo o mesmo substituído por outro que esteja íntegro. Entretanto, o julgamento final quanto à adequabilidade do equipo é sempre do profissional habilitado que o utiliza;
- ✓ Descarte e não use equipo fora do prazo de validade e/ou previamente abertos ou danificados, nem aqueles com perda da esterilidade. Recomenda-se, então, que o equipo seja descartado no lixo hospitalar (conforme as normas vigentes das autoridades sanitárias). A esterilidade do artigo só é garantida se houver estado íntegro da embalagem e do artigo e este estiver dentro do prazo de validade;
- ✓ Para os equipos que forem removidos da embalagem e inseridos dentro do ambiente cirúrgico, mesmo que não tenham sido utilizados ou contaminados por outras fontes, a limpeza subsequente não deve ser feita e convém que o equipo seja descartado no lixo hospitalar conforme as normas vigentes das autoridades sanitárias;®



Lamedid Comércio e Serviços Ltda.
Endereço: Avenida Gupê, nº. 10767-
Galpão 20, Bloco IV - Jardim Belval.
Barueri – SP – CEP 06.422-120
Tel.: 11 4789-5878 Fax: 11 47893307

- ✓ Não re-esterilize nem reutilize o equipo;
- ✓ Em hipótese alguma utilize o equipo caso o mesmo tenha sido contaminado;
- ✓ Ao manipular os equipos, utilize as técnicas e instrumentais adequados;
- ✓ Utilizar sempre técnicas assépticas no manuseio;
- ✓ Não permitir que pessoas despreparadas utilizem o produto em questão;
- ✓ Não permitir o uso indevido bem como o mau uso do produto;
- ✓ Seguir detalhadamente todas as orientações de uso;
- ✓ Não utilizar para sangue ou seus derivados;
- ✓ Em hipótese alguma utilize o equipo, caso a mesmo tenha sido contaminado;
- ✓ O procedimento de colocação e retirada deve ser feito com muita atenção para evitar qualquer risco ao usuário;
- ✓ Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada;
- ✓ Descartar após uso único;
- ✓ Ao descartar o equipo usado, procurar recipientes adequados para se descarte.
- ✓ A indicação de cada tamanho específico é de responsabilidade do profissional legalmente habilitado para utilizar o dispositivo. Sendo utilizado em processos de rotina em serviços de saúde.
- ✓ Só utilize o dispositivo para a finalidade a qual se destina.

➤ Termo de Garantia Legal:

De acordo com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor: Lei nº. 8.078, de 11 de Setembro de 1990.

A empresa **LAMEDID COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA**, em cumprimento ao artigo nº 8.078 da lei, de 11 de Setembro de 1990 vêm por meio deste instrumento legal, garantir o direito do consumidor de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação de todos os produtos por ela importados e comercializados, pelo prazo de 90 dias, a contar da data de entrega efetiva dos produtos. Tratando-se de vício oculto, o prazo de decadência inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito, conforme disposto Parágrafo 3º do Art. 26 da Lei 8.078.



Lamedid Comércio e Serviços Ltda.
Endereço: Avenida Gupê, nº. 10767-
Galpão 20, Bloco IV - Jardim Belval.
Barueri – SP – CEP 06.422-120
Tel.: 11 4789-5878 Fax: 11 47893307

Para que o presente termo de Garantia Legal surta efeito, o consumidor deverá observar as condições abaixo descritas:

- Não permitir que pessoas despreparadas utilizem o produto em questão.
- Não permitir o uso indevido bem como mau uso do produto.
- Não utilizar o produto se o mesmo estiver com a embalagem danificada.
- Não utilizar o produto, se o mesmo apresentar alguma alteração detectável visualmente.
- Seguir detalhadamente todas as orientações de uso.

Aplicável aos modelos:

Número do produto	Modelo		Câmara de gotejamento	Regulador de fluxo	Sítio de injeção	Filtro de Fluido	Encaixe macho
Modelo 1	Macro	Sem entrada de ar	Flexível	Azul - typo V	Tubo de latex	Não	Luer tip
Modelo 2	Macro	Sem entrada de ar	Flexível	Azul - typo V	Bulbo	Não	Luer tip
Modelo 3	Macro	Sem entrada de ar	Flexível	Azul - typo V	Conector em Y	Não	Luer tip
Modelo 4	Macro	Sem entrada de ar	Flexível	Azul - typo V	Tubo de latex	Sim	Luer tip
Modelo 5	Macro	Sem entrada de ar	Flexível	Azul - typo V	Bulbo	Sim	Luer tip
Modelo 6	Macro	Sem entrada de ar	Flexível	Azul - typo V	Conector em Y	Sim	Luer tip
Modelo 7	Micro	Sem entrada de ar	Flexível	Azul - typo V	Tubo de latex	Não	Luer tip
Modelo 8	Micro	Sem entrada de ar	Flexível	Azul - typo V	Bulbo	Não	Luer tip
Modelo 9	Micro	Sem entrada de ar	Flexível	Azul - typo V	Conector em Y	Não	Luer tip
Modelo 10	Micro	Sem entrada de ar	Flexível	Azul - typo V	Tubo de latex	Sim	Luer tip
Modelo 11	Micro	Sem entrada de ar	Flexível	Azul - typo V	Bulbo	Sim	Luer tip
Modelo 12	Micro	Sem entrada de ar	Flexível	Azul - typo V	Conector em Y	Sim	Luer tip
Modelo 13	Macro	Com entrada de ar	Flexível	Azul - typo V	Tubo de latex	Não	Luer tip
Modelo 14	Macro	Com entrada de ar	Flexível	Azul - typo V	Bulbo	Não	Luer tip
Modelo 15	Macro	Com entrada de ar	Flexível	Azul - typo V	Conector em Y	Não	Luer tip
Modelo 16	Macro	Com entrada de ar	Flexível	Azul - typo V	Tubo de latex	Sim	Luer tip
Modelo 17	Macro	Com entrada de ar	Flexível	Azul - typo V	Bulbo	Sim	Luer tip
Modelo 18	Macro	Com entrada de ar	Flexível	Azul - typo V	Conector em Y	Sim	Luer tip
Modelo 19	Micro	Com entrada de ar	Flexível	Azul - typo V	Tubo de latex	Não	Luer tip
Modelo 20	Micro	Com entrada de ar	Flexível	Azul - typo V	Bulbo	Não	Luer tip
Modelo 21	Micro	Com entrada de ar	Flexível	Azul - typo V	Conector em Y	Não	Luer tip
Modelo 22	Micro	Com entrada de ar	Flexível	Azul - typo V	Tubo de latex	Sim	Luer tip
Modelo 23	Micro	Com entrada de ar	Flexível	Azul - typo V	Bulbo	Sim	Luer tip
Modelo 24	Micro	Com entrada de ar	Flexível	Azul - typo V	Conector em Y	Sim	Luer tip



Lamedid Comércio e Serviços Ltda.
Endereço: Avenida Gupê, nº. 10767-
Galpão 20, Bloco IV - Jardim Belval.
Barueri – SP – CEP 06.422-120
Tel.: 11 4789-5878 Fax: 11 47893307

CRITICAS, SUGESTÕES, DÚVIDAS E RECLAMAÇÕES OU HAVENDO QUALQUER INTERCORRÊNCIA COM O PRODUTO, UTILIZAR OS CANAIS DE ATENDIMENTO EXCLUSIVO:

SAC: 0800 6658007_
qualidade@lamedid.com.br
Tel.: 11 4789-5878 Fax: 11 47893307

ESTA INSTRUÇÃO DE USO ESTÁ DISPONÍVEL EM MEIO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO LINK:

Responsável Técnico

Luciana J.Lanzillo
Farmacêutica

Responsável Legal

Ronald Martin Hugo Hoejenbos