



Lamedid Comercial e Serviços Ltda.  
Fone: (11) 4789 5878 / Fax: (11) 4789 3307  
Av. Gupê 10767 - Gl 20 - Bl IV - Jd Belval  
Barueri / SP CEP 06422-120

## INSTRUÇÕES DE USO

### **ESTETOSCÓPIO**

Nome Técnico: Estetoscópio

**Fabricante:** Wuxi Kaishun Medical Apparatus and Instruments Factory.

**Endereço:** no. 90, East Street, Zhangjing Town, Xishan zone, Wuxi, China.

**Importador:** Lamedid Comercial e Serviços LTDA

**Endereço:** Av. Gupê 10767 Gl 20 Bl IV – Jd. Belval – Barueri SP CEP 06422-120

**Razão social:** Lamedid Comercial e Serviços LTDA

**CGC:** 46.568.655/0001-61

**Telefone:** 11 4789 5878

**Fax:** 11 4789 3307

**Classe de risco:** I

**PRODUTO NÃO ESTÉRIL Registro**

**ANVISA nº: 10237589013**


**Responsável técnico:** Luciana J. Lanzillo

**Autarquia profissional:** CRF/SP 41067



**Lamedid**

Lamedid Comercial e Serviços Ltda.  
Fone: (11) 4789 5878 / Fax: (11) 4789 3307  
Av. Gupê 10767 - Gl 20 - Bl IV - Jd Belval  
Barueri / SP CEP 06422-120

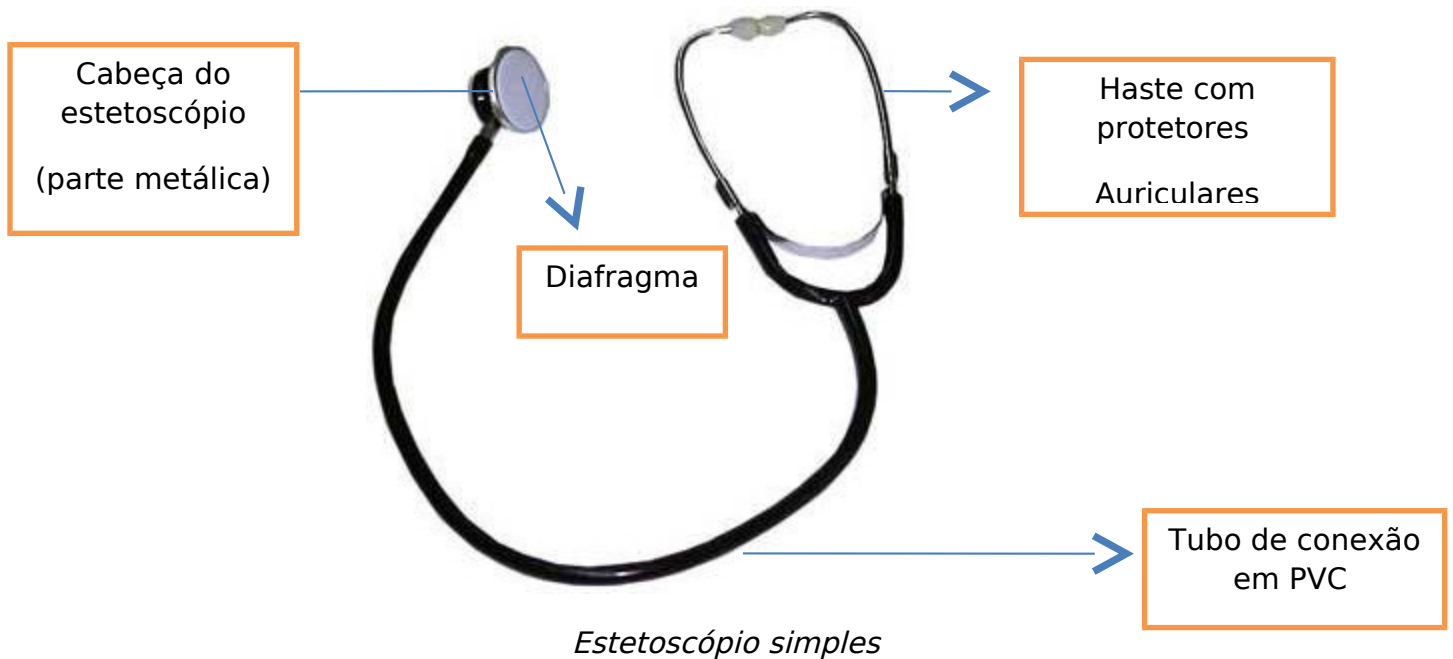



**Lamedid**

Lamedid Comercial e Serviços Ltda.  
Fone: (11) 4789 5878 / Fax: (11) 4789 3307  
Av. Gupê 10767 - Gl 20 - Bl IV - Jd Belval  
Barueri / SP CEP 06422-120



*Estetoscópio cabeça dupla*

*ogivas adicionais*

## **Descrição do princípio físico e fundamentos da tecnologia do produto para seu funcionamento e sua ação:**

O Estetoscópio tem como função auxiliar na ausculta cardíaca, vascular, pulmonar, e intestinal. Sua utilização está indicada em qualquer exame físico médico e pode ser utilizado por qualquer profissional habilitado.

O produto está pronto para uso, não sendo necessário calibração ou

Instruções de Uso

**ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR SOLIDOR®**

aferição.

Sua utilização é manual e não está associado ao funcionamento interligado a outro equipamento. Trata-se de um instrumento para auscultação e não de medição, por esse motivo, não há necessidade de aferição ou calibração periódica.

### **Relação das partes e acessórios destinados a integrar o produto, assim como de todos os opcionais e materiais de consumo por ele utilizados.**

Material de confecção da Cabeça (parte metálica)	Liga de alumínio 6061
Material de confecção da Haste:	Cobre n.62
Comprimento total:	28 cm
Acessórios disponíveis:	Não se aplica
Material de confecção do Tubo de Conexão entre as Hastes e a Cabeça:	PVC
Peso do Estetoscópio:	20g
Ogivas e Ogivas adicionais	PVC ou Silicone
Diafragma (cabeça)	película de PVC e gaze

**Embalagem não Estétil:** contendo 01 Estetoscópio e 5 Protetores Auriculares, manual do usuário;

**Embalagem Externa:** caixa de papel cartão de média gramatura, com etiquetas aderidas nas faces superior, frontal e inferior (em português).

### **Relação de materiais de apoio que acompanham o produto ou opcionais:**

3 protetores auriculares de reserva

Não há *opcional* a integrar o Estetoscópio.

Como *material de apoio* destinados a integrar o produto, encontra-se um manual de leitura com todas as informações necessárias para o seu uso.

### **Especificações e características técnicas do produto, tais como composição, dimensões e outras informações características do produto:**

**Composição:** Liga de alumínio, cobre e PVC ou silicone (ogivas)

**Conteúdo:** um estetoscópio com 3 protetores auriculares de reserva e manual do



Lamedid Comercial e Serviços Ltda.  
Fone: (11) 4789 5878 / Fax: (11) 4789 3307  
Av. Gupê 10767 - Gl 20 - Bl IV - Jd Belval  
Barueri / SP CEP 06422-120

usuário.

### **Condições de conservação do produto:**

A limpeza deve ser feita com um pano com solução fraca de sabão e água e secá-lo em seguida.

### **Condições de armazenamento/estocagem e transporte do produto:**

- Temperatura de armazenamento de 0° a 55° C;
- Não pise na embalagem;
- Não apoie peso sobre o produto ou sobre a embalagem;
- Não permita quedas sobre superfícies rígidas;
- Armazene o produto em local limpo, seco, protegido da luz direta do sol e vapores químicos.
- Limpe-o somente como indicado no item conservação.

### **Transporte:**

O estetoscópio deve ser transportado de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem. Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso.

### **Armazenamento/estocagem:**

Em todas as áreas de estocagem, antes da utilização, o artigo deve ser armazenado de forma a manter sua configuração e seu acabamento de superfície e não danificar sua embalagem. Armazenar em estantes de armação metálica ou vidro, com altura mínima do piso, possibilitando assim a limpeza e higiene diária; garantir que o ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto estocado.

O produto deve ser armazenado em local seco e fresco, protegido do calor excessivo e da luz do sol direta.

### **Rotação de estoque:**

O princípio “primeiro que entra, primeiro que sai” é recomendado. Convém que seja adotada a prática de rotação de estoque para todos os artigos, estéreis e não estéreis, em todas as áreas de estocagem.

### **Procedimentos técnicos necessários para o usuário ou operador conectar, manusear e utilizar o produto:**



Lamedid Comercial e Serviços Ltda.  
Fone: (11) 4789 5878 / Fax: (11) 4789 3307  
Av. Gupê 10767 - Gl 20 - Bl IV - Jd Belval  
Barueri / SP CEP 06422-120

## **Instruções para uso do produto:**

Colocar as hastes metálicas nos ouvidos, encostar a cabeça do estetoscópio no local desejado, utilizando a semiologia médica adequada.

O estetoscópio modelo simples pode ser utilizado em adultos e adolescentes;

O estetoscópio modelo duplo, pode ser utilizado em adultos, adolescentes, crianças e neonatos.

### **IMPORTANTE:**

Aconselha-se o uso de técnicas médicas de semiologia para a ausculta com estetoscópio.

## **Descrição de que o produto somente pode ser usado ou operado por profissional com habilitação definida:**

A utilização é de responsabilidade do profissional legalmente habilitado usando técnicas médicas de semiologia.

## **Desempenho previsto nos Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia dos Produtos Médicos**

Os Estetoscópios são utilizados em processos de rotina em serviços de saúde (hospitais, clínicas, postos de saúde e consultórios médicos), por pessoal legalmente habilitado.

## **Indicação, finalidade ou uso a que se destina o produto:**

O Estetoscópio tem como função auxiliar na ausculta cardíaca, vascular, pulmonar, e intestinal. Sua utilização está indicada em qualquer exame físico médico.

## **Efeitos secundários ou colaterais e contra-indicações, quando aplicável:**

### **COMPLICAÇÕES POTENCIAIS:**

Nenhuma complicação foi descrita.

### **CONTRA – INDICAÇÕES:**

Nenhuma contra-indicação foi descrita.



Lamedid Comercial e Serviços Ltda.  
Fone: (11) 4789 5878 / Fax: (11) 4789 3307  
Av. Gupê 10767 - Gl 20 - Bl IV - Jd Belval  
Barueri / SP CEP 06422-120

## ➤ Termo de Garantia Legal

( De acordo com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor: Lei nº. 8.078, de 11 de Setembro de 1990)

A empresa Lamedid Comercial e Serviços LTDA, em cumprimento ao artigo no. 8.078 da lei, de 11 de Setembro de 1990 vêm por meio deste instrumento legal, garantir o direito do consumidor de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação de todos produtos por ela importados e comercializados, pelo prazo de 90 dias, a contar da data de entrega efetiva dos produtos. Tratando-se de vício oculto, o prazo de decadência inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito, conforme disposto Parágrafo 3º do Art. 26 da Lei 8.078.

Para que o presente termo de Garantia Legal surta efeito, o consumidor deverá observar as condições abaixo descritas:

- Não permitir que pessoas despreparadas utilizem o produto em questão.
- Não permitir o uso indevido bem como mau uso do produto.
- Seguir detalhadamente todas as orientações de uso.

---

Responsável Técnico  
Luciana J. Lanzillo  
CRF/SP 41067

---

Responsável Legal  
Ronald Martin Hugo Hoejenbos